



ALLCLEAN®

Instrumentdesinfectie

Concentraat



Productinformatie

Aldehydevrij concentraat voor de reiniging en ontsmetting van instrumenten, incl. roterende instrumenten van metaal en kunststoffen, zoals bijv. PE en PP.

- Breed inzetbaar - voor alle instrumenten, inclusief roterend instrumentarium.
- Geteste effectiviteit met breed werkingsspectrum tegen bacteriën, gisten en een aanzienlijke hoeveelheid virussen. Beperkt virucide (omkapselde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen), norovirussen en polyomavirussen.
- Getest volgens de allerlaatste methoden van de VAH (Duits instituut voor de certificering van desinfectiemiddelen) en de Europese normen.
- Kostenbesparend door lage toepassingsconcentratie.
- Zeer goede materiaalcompatibiliteit door speciale corrosieremmers.
- De houdbaarheid van de gebruikso oplossing bedraagt max. 14 dagen.

TOEPASSING

ALLCLEAN® voor reiniging in een concentratie van 2% toepassen met een inwerktijd van 5 min. Spoel de instrumenten grondig af onder stromend water en reinig ze indien nodig met de hand. Gebruikt reinigingsmiddel elke werkdag vervangen. Gereinigde instrumenten vervolgens ontsmetten met ALLCLEAN®. ALLCLEAN® wordt gebruikt als een 2%-oplossing. Daartoe ALLCLEAN® volgens VAH bij 2% - 5 min. (bactericide/levurocide) c.q. bij 2% - 60 min. (tuberculocide) toepassen; in ultrasone apparatuur 2% - 2 min., voor tuberkel- dan wel mycobacteriën 2% - 30 min. Een inactivering van de virussen vindt plaats bij 2% - 1 min. tot 60 min. Na de inwerktijd moet het ontsmette instrumentarium minstens 15 seconden onder een krachtige straal water worden gehouden om het ontsmettingsmiddel te verwijderen.

MICROBIOLOGISCHE EFFECTIVITEIT

Toepassing		Verhouding concentratie-tijd
Toepassingsaanbeveling voor de ontsmetting van instrumenten volgens VAH	Bactericide/levurocide	2% - 5 min.
	Tuberculocide	2% - 60 min.

Werkingsspectrum	Getest volgens	Verhouding concentratie-tijd
------------------	----------------	------------------------------

Bacteriën en gisten		
Bactericide/levurocide	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2% - 5 min.
Bactericide/levurocide in ultrasone apparatuur	EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562	2% - 2 min.
Tuberculocide, mycobactericide in ultrasone apparatuur	EN 14348, EN 14563	2% - 30 min.

Virussen		
Beperkt virucide (omkapselde virussen incl. HBV, HCV, HIV en coronavirussen)	EN 14476, EN 17111	2% - 15 min.
	Richtlijn DVV/RKI (Duitse RIVM)	2% - 1 min.
Norovirussen	EN 14476, EN 17111	2% - 60 min.
Polyomavirussen SV40	Richtlijn DVV/RKI	2% - 15 min.

GOEDKEURINGSTESTS VAN ALLCLEAN®

Getest onder hoge organische belasting volgens Richtlijn DVV/RKI. EN