



Gebruiksklare sneldesinfectie van medische hulpmiddelen en algemene oppervlakken op basis van alcohol.

## mikrocid<sup>®</sup> AF wipes

### Onze pluspunten

- gebruiksklaar
- aldehydevrij
- zeer breed werkingsspectrum, inclusief virusclaim
- korte inwerktijd van 1 minuut
- in verschillende formaten doekjes verkrijgbaar
- geen strepen of residu / snelle droging
- toelaten in de BENELUX: 14020 N, BE-REG-01643, 52/15/L

### Toepassingsgebied

Alcoholische sneldesinfectie voor medische hulpmiddelen [CE 0297] en algemene oppervlakken. Geschikt voor:

- eenheden waar patiënten behandeld worden
- onderzoekstafels
- OK-tafels en aangrenzende werkvlakken
- oppervlakken van medische apparatuur
- algemene (kleine) oppervlakken

### Gebruiksaanwijzing

#### A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT ALS BIOCID

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen), mycobacteriën, gisten en schimmels, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen, op harde oppervlakken (incl. apparaten en materialen) in

- ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
- in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg;
- productieruimtes in de farmaceutische en cosmetische industrie;
- transportmiddelen bestemd voor mensen,

met uitzondering van oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen hiervoor.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

#### B. GEBRUIKSAANWIJZING ALS BIOCID

Algemeen: Mikrocid AF wipes is een gebruiksklaar product en is bestemd voor desinfectie van harde oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg en productie ruimtes voor farmaceutische en cosmetische industrie. Behandel geen oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, o.a. acryl glas e.d..

Toepassing: Volg de hygiëne voorschriften van de fabrikant tijdens het bijvullen en invoegen van het eerste doekje. De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Bevochtig de te behandelen oppervlakken met de geïmpregneerde doekjes en zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Het product verdampt volledig. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Na gebruik de verpakking van de doekjes goed afsluiten. Dosering: gebruik zoveel mikrocid AF wipes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd vochtig blijven - 1 mikrocid AF wipe is geschikt voor maximaal 0,3 m<sup>2</sup> oppervlak - 1 mikrocid AF jumbo wipe is geschikt voor maximaal 0,5 m<sup>2</sup> oppervlak.

Minimale inwerktijd bacteriën, mycobacteriën, gisten, omkapselde virussen en een beperkt aantal niet-omkapselde virussen: 1 min.

Schimmels: 5 min.

Waarschuwing: Ontvlambaar, houd verwijderd van open vuur.

**GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL:** niet geschikt voor het desinfecteren van invasieve medische hulpmiddelen.

CE 0297



## Productinformatie

### Samenstelling:

100 g oplossing bevat: Werkzamestof 25 g Ethanol (94 %), 35 g. Propan-1-ol

### Chemisch-fysische gegevens van de werkzame stof

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Dichtheid              | circa 0,89 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / van de werkzame stof |
| Kleur                  | kleurloos                                                   |
| pH                     | Niet van toepassing                                         |
| Viscositeit, dynamisch | Geen gegevens beschikbaar                                   |
| Flampunt               | 27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / van de werkzame stof   |
| Vorm                   | Waterachtig-alcoholische oplossing van nonwovens            |

## Speciaal advies

Oogcontact vermijden. Alcohol gevoelige oppervlakken (zoals bijvoorbeeld acrylgas) niet met dit product behandelen. Voor een alternatief product verwijzen wij u naar de mikrozid® sensitive range. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren- en veiligheidsadvies.

## Bestelinformatie

| Artikel                                           | Eenheid | Artikel nr. |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|
| mikrozid AF wipes Ref INT 150 ST BT               | 20/Doos | 70002062    |
| mikrozid AF wipes prem 50 ST SP                   | 12/Doos | 70000808    |
| mikrozid AF wipes Jumbo Ref 200 ST BT             | 12/Doos | 70001405    |
| mikrozid AF wipes Jumbo Ref-NL-200 ST BT          | 12/Doos | 70001453    |
| mikrozid AF wipes Jumbo Ref 220 ST BT             | 12/Doos | 70003094    |
| mikrozid AF wipes Jumbo Ref-NL-220 ST BT          | 12/Doos | 70003221    |
| mikrozid AF wipes-NL 150 ST DS 14x17.5cm          | 10/Doos | 109128      |
| mikrozid AF wipes -INT- 150 ST DS                 | 10/Doos | 109203      |
| mikrozid AF wipes Jumbo-NL-200 ST DS 20x27cm      | 10/Doos | 109319      |
| mikrozid AF wipes Jumbo 220 ST DS                 | 10/Doos | 70003093    |
| mikrozid AF wipes Jumbo -NL- 220 ST DS            | 10/Doos | 70003220    |
| mikrozid AF wipes Ref-NL- 20x 150 ST DS 14x17.5cm | 1/Doos  | 109129      |

## Accessoires

| Accessoires                           | Artikel nr. |
|---------------------------------------|-------------|
| Wandhouder voor mikrozid bussen       | 134417      |
| Wandhouder voor mikrozid jumbo bussen | 134421      |

## Verwante producten

- mikrozid® PAA wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal wipes green line

## Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

## Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de mikrozid producten is terug te vinden op internet via website [www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl).

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031(0) 23 535 26 34 of internationaal 0049 (0)40 521 00 666



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

**schülke Benelux**  
Schülke & Mayr Benelux B.V.  
Oudeweg 8d  
2013 CC Haarlem, Nederland  
Tel: +31 (0) 23 535 26 34  
[www.schuelke.nl](http://www.schuelke.nl)  
[salesbenelux@schuelke.com](mailto:salesbenelux@schuelke.com)

**schülke hoofdkantoor**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Duitsland  
Tel: +49 40 - 52100 - 0  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)