



# WandelWol®

Dé oplossing bij blaren en voet-ongemak



Verkrijgbaar in:

10G

20G

40G

## Dé enige echte antidruk-wol



### 100% natuurproduct

Zonder chemische toevoegingen of bewerkingen



### Unieke melange

100% schapenwol, bevat lanoline



### Herstellend vermogen

Verzacht ontstane blaren, voorkomt blaarvorming



### Vochtregulatie

Absorbeert transpiratievocht en ventileert



### Toepasbaar bij vele sporten

Werkt drukontlastend, behoud voor teennagels en voeten



### Biologisch afbreekbaar

Door zijn natuurlijke afkomst



### Thermische werking

Warme voeten in de winter, verkoelt in de zomer



### Duurzaam

95% plant-based verpakking en duurzame inhoud



Voor meer informatie: [www.wandelwol.nl](http://www.wandelwol.nl) of mail naar [info@wandelwol.nl](mailto:info@wandelwol.nl)



# WandelWol®

Dé oplossing bij blaren en voet-ongemak

## Gebruiksaanwijzing

- Breng WandelWol antidruk-wol rechtstreeks aan op de gewenste plek, op de blote voet. Ook preventief inzetbaar.
- Gebruik tenminste zoveel WandelWol antidruk-wol, totdat u de huid er niet meer doorheen ziet.
- Trek uw sok en schoen weer aan.
- De WandelWol antidruk-wol hecht zich in de sok, waardoor het niet verschuift en niet vastgeplakt hoeft te worden.
- WandelWol antidruk-wol vormt zich naar de voet.
- WandelWol antidruk-wol werkt drukontlastend en pijnverlichtend. U zult direct verlichting voelen.
- Verwijderen van de WandelWol antidruk-wol gaat eenvoudig.
- Vervang indien nodig, sneller vervangen bij intensief gebruik.



## WandelWol® antidruk-wol

Het antidruk-product van WandelWol wordt gemaakt van een melange van 100% schapenwol; zonder chemische toevoegingen of bewerkingen. Het materiaal is zacht, bevat lanoline (wolvet) en geeft u het gevoel te lopen op wolken. WandelWol antidruk-wol is door zijn natuurlijke afkomst biologisch afbreekbaar. WandelWol antidruk-wol absorbeert transpiratievocht en ventileert. Zorgt voor warme voeten in de winter en verkoelt in de zomer. De antidruk-wol verzacht ontstane blaren en voorkomt blaarvorming. Werkt drukontlastend en pijnverlichtend.

## Weten voor welke voetongemakken WandelWol antidruk-wol toegepast kan worden?

Kijk dan op: [www.wandelwol.nl/wandelwol-kennisbank/](http://www.wandelwol.nl/wandelwol-kennisbank/)

**LET OP:** Dit product niet gebruiken bij een lanoline-allergie (wolvet-allergie). Gebruik dan de WandelWol antidruk-wol lanoline-vrij op basis van alpacawol. Gebruik géén WandelWol antidruk-wol op beschadigde huid of open wonden, het is geen geneesmiddel! Wij adviseren neuropathiepatiënten het gebruik van WandelWol antidruk-wol eerst te overleggen met de huisarts. Zet WandelWol antidruk-wol tijdelijk in, het is geen langdurige oplossing! Bezoek regelmatig uw voetspecialist bij chronische klachten.



Voor meer informatie: [www.wandelwol.nl](http://www.wandelwol.nl) of mail naar [info@wandelwol.nl](mailto:info@wandelwol.nl)