


STANDAARD BEKLEDING

De standaard bekleding (bekleding zonder meerprijs) voldoet aan alle medische standaarden en is leverbaar in 34 verschillende kleuren*:

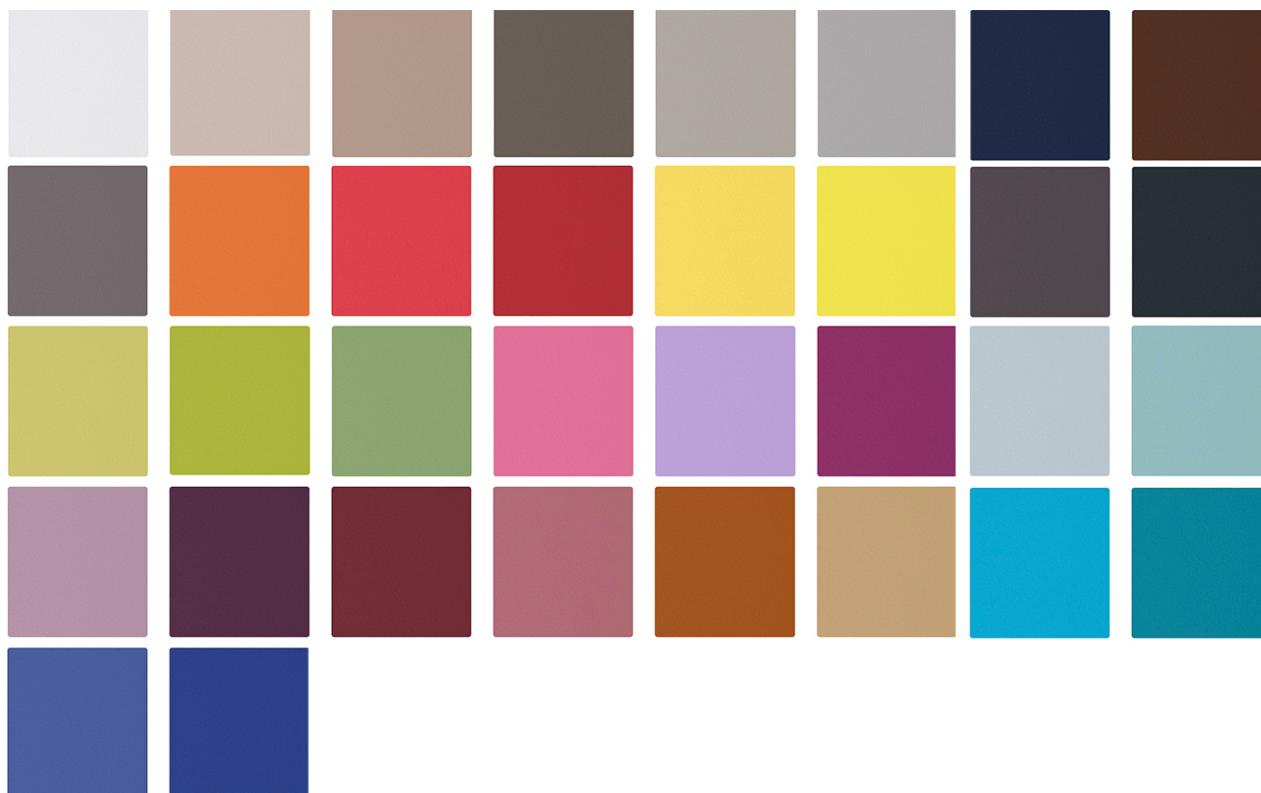

PURFECT BEKLEDING

De purfect bekleding (bekleding tegen meerprijs) is nog duurzamer dan de standaard lijn. Deze bekleding is desinfecteerbaar, voldoet aan de strengste eisen inzake brandwerendheid en is uitermate geschikt voor ruimtes waar een perfecte hygiëne van essentieel belang is. Het materiaal is vrij van PVC en ftalaten, waterdicht en voldoet aan de Oeko-Tex en Reach norm. Leverbaar in 36 verschillende kleuren*:



ONDERHOUD KUNSTLEER

Alle soorten skai zijn makkelijk te reinigen. Gebruik hiervoor lauwwarm water met neutrale zeep in combinatie met een vezeldoek. Behandel na met schoon water. Er zijn ook speciale reinigingsproducten voor de bekleding verkrijgbaar. Gebruik geen oplosmiddelen of andere alcohol- of chloorhoudende reinigingsmiddelen, tenzij u bekleding heeft uit onze purfect lijn (lees hieronder)!

Vlekken van een balpen of bepaalde kledingstukken zoals jeans, moeten onmiddellijk verwijderd worden om mogelijke migratie met skai te voorkomen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de overdracht van kleurstoffen van jeans en donkere kleding. Het gebruik van een badstof hoes voorkomt dat de skai aangetast kan worden door huidzuren. Bij veelvuldig gebruik van de gezichtsuitsparing adviseren wij uit hygiënisch oogpunt het gebruik van facecovers.

DESINFECTIE VAN DE PURFECT LIJN SKAI

De purfect lijn skai is zonder problemen desinfecteerbaar met een door de fabrikant getest en goedgekeurd desinfectiemiddel, zoals Tevan Panox 300, AzoWipe, Mikrozyd Af Wipes, Baccilol 30 Foam en alcohol 70%. Voor andere desinfectiemiddelen waaronder alcohol 80% kan de fabrikant geen (lange termijn) garantie afgeven.

* Houd er rekening mee dat de getoonde kleuren altijd iets kunnen afwijken van de werkelijkheid. Heeft u advies nodig bij het maken van een juiste keuze, neem dan gerust contact op of kom langs in onze showroom.