


GEBRAUCHSINFORMATION INSTRUCTIONS FOR USE

Chloroethyl / Ethyl Chloride

1. Nach Drücken des Hebels - Sprühen auf das Objekt

Direct towards application site,
then press lever -
- spray the object -

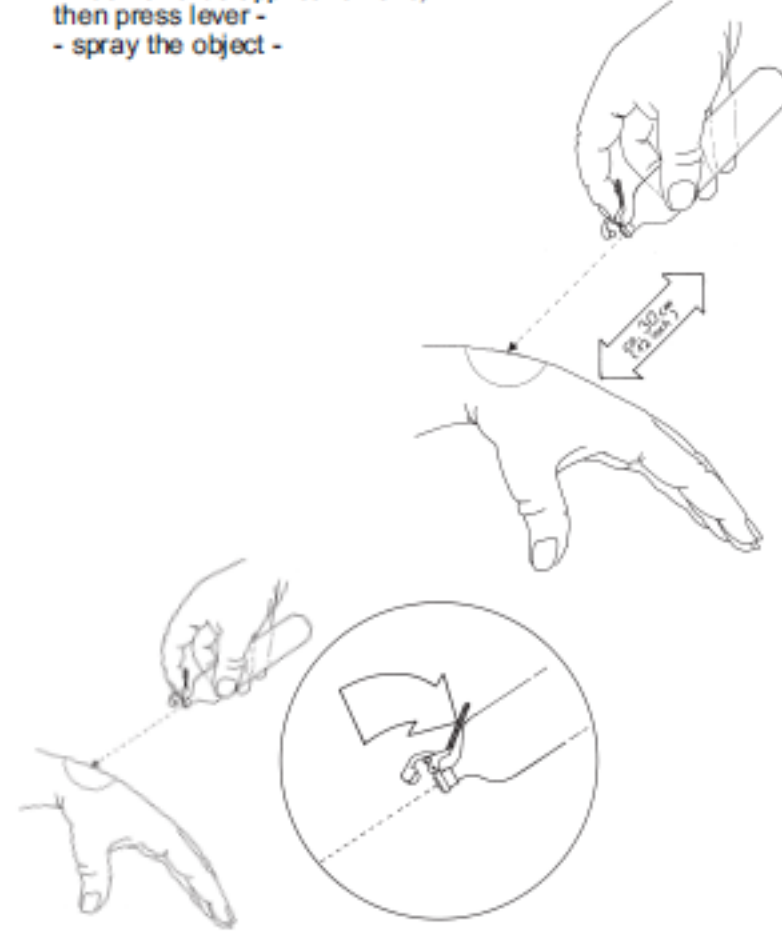


2. Langsames Schließen des Hebels und dabei auf Gasdichtheit achten!

Achtung: kleine Kapillaröffnung muß mit Gummistopfen gut verschlossen werden!

- Close slowly the lever and make sure gas cannot escape!

CAUTION: small capillary opening must be well closed with rubber stopper. -

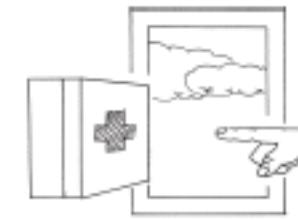

3. Verschlossen und gesichert in einem gut belüfteten Raum aufbewahren (nicht im Kühlschrank verwahren).

- Store closed and in a safe place in a well ventilated room (do not keep in refrigerator). -

