

Instant Cold Pack

ready to use & intense cooling for acute injuries



WE CARE U SPORT.

Wat biedt de Instant Cold Pack jou?

- Eerste hulp behandeling bij acute (sport)blessures zoals kneuzingen, verstuikingen, zwellingen, blauwe plekken, verrekkingen, spierpijn, bloedingstoringen, ontstekingen, etc.
- Versnelling van het herstelproces door snelle en effectieve koeling.
- Een instant cold pack direct klaar voor gebruik (geen vriezer nodig). Door het pack te breken en te schudden wordt deze binnen enkele seconden koud (- 4°C).
- Vermindering van pijn en zwelling door een snelle toepassing van koudetherapie.
- Een ideaal hulpmiddel voor in EHBO-kits en sportverzorgingstassen, of om op mee te nemen op reis.
- Een draagbaar en licht cold pack, in formaat 14 × 18 cm.

Bij acute (sport)blessures is het van belang om de pijnlijke plek direct te koelen. Door het koelen van de blessure trekken de bloedvaten samen, waardoor de bloedstroom, en daardoor de zwelling, verminderd. Ook kan koelen helpen om de pijn te verminderen door het getroffen gebied te verdoven. De Instant Cold Pack kan worden toegepast bij acute blessures, zoals een verstuiking, verrekking, verzwikking, val of botsing, om pijn en zwelling te verlichten en het herstelproces te versnellen.

De Instant Cold Pack is direct klaar voor gebruik en biedt snelle en intense verkoeling. Het enige wat je hoeft te doen is het pack in te drukken, te schudden en vervolgens op de pijnlijke plek of blessure te plaatsen. Deze toepassing leent zich zeer goed voor eerste hulp behandelingen van sportblessures. De Instant Cold Pack is ideaal om mee te nemen in een EHBO-kit of sporttas of op reis!

Productinformatie

- Afmeting: 14 × 18 cm
- Artikelnr: 77-600006

Inhoud verpakking

- Instant Cold Pack
- Ook verkrijgbaar in overdoos 25 stuks

Meer informatie



Gebruiksaanwijzing

De Instant Cold Pack is alleen geschikt voor uitwendig en eenmalig gebruik. De pack is direct klaar voor gebruik en er is geen vriezer nodig. Niet gebruiken op een beschadigde huid. Gebruik altijd een dunne doek tussen het cold pack en de huid ter bescherming van de huid.

1. Breek de inwendige ballon door met beide handen in de verpakking te knijpen op de aangegeven plaats. Hierdoor ontstaat een chemische reactie waardoor de Instant Cold Pack direct koud wordt.
2. Schud de verpakking ongeveer 10 seconden om de inhoud te mengen.
3. Breng de Instant Cold Pack aan het geblesseerde of pijnlijke lichaamsdeel (gebruik een dunne doek tussen de huid en het cold pack).
4. Koel het geblesseerde of pijnlijke lichaamsdeel minimaal 10 en maximaal 15 minuten. Gebruik het cold pack niet langer dan 15 minuten, om bevriezing te voorkomen.

Bewaar de Instant Cold Pack op huiskamertemperatuur. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Scan de QR-code voor meer informatie over het juiste gebruik van de Instant Cold Pack, inclusief een instructiefilmpje!



WE CARE U SPORT.